


Advance Plus

förgelad tappningskateter
med skyddande införingshylsa

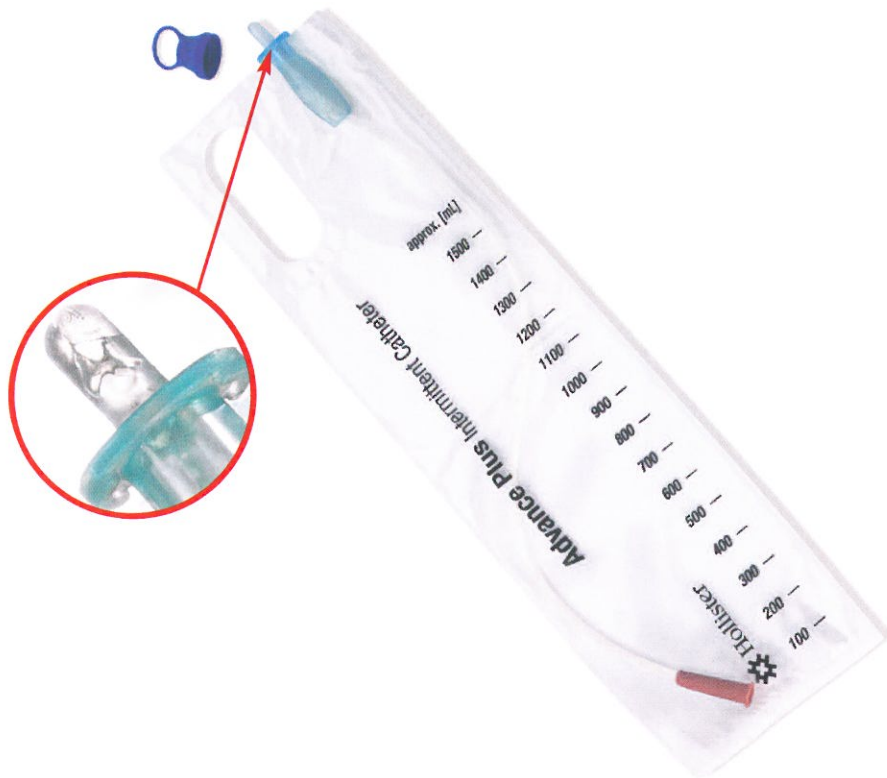

Användarmanual för kvinnor



Hollister
Enhagslingen 5
187 40 TÄBY
Tel: 08-446 46 46
Fax: 08-446 46 45
kundtjänst@hollister.com



Denna manual är en rekommendation från tillverkaren. Var noga med att alltid följa de instruktioner du fått av din läkare/sjuksköterska.




Tvätta händerna. Sära på blygdläpparna och tvätta kring urinrörsmynningen med mild tvål och vatten vid dagens första tappning, därefter endast med vatten. Eller följ de instruktioner Du fått av Din läkare/sjuksköterska.



Ta katetern ur ytterförpackningen.



Ta bort kateterens blå skyddshatt.

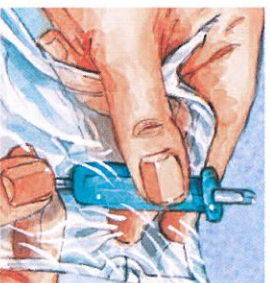

Håll löst med en hand om gelbehållaren (det är viktigt att hålla löst så att inte onödigt mycket gel kläms ut) och för med den andra handen ut katetern så att den tyller ut och stabiliserar den skyddande införingshysan. Katetern ska inte stricka ut utanför införingshysan.



Håll blygdläpparna särade och fatta katetern om gelbehållaren. Håll försiktigt långt bak på behållaren så att inte onödigt mycket gel pressas ut. För in införingshysan tills behållaren kommer i kontakt med urinrörsmynningen. *(En spegel kan vara en bra hjälp, fråga Din förskrivare.)*




Håll införingshysan på plats och fortsätt att föra in katetern i urinröret tills urin börjar rinna. Kläm lite extra på gelbehållaren för mer gel. Dra tillbaka uppsamlingspåsen allt eftersom katetern förs in. När urin har börjat rinna förs katetern in ytterligare några centimeter så urinblåsan töms ordentligt.



Dra sakt ut katetern så att all eventuell kvarstående urin kan rinna ut.



Gör en öppning i uppsamlingspåsen genom att riva upp en bit i jacket intill införingshysan. Töm sedan urinen i en toalett eller ett uppsamlingskärl.

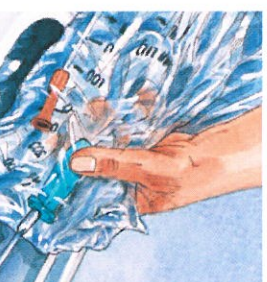

Slägg katetern i avfallsbehållare. Spola inte ned den i toaletten.