


Advance Plus

förgelad tappningskateter
med skyddande införingshylsa

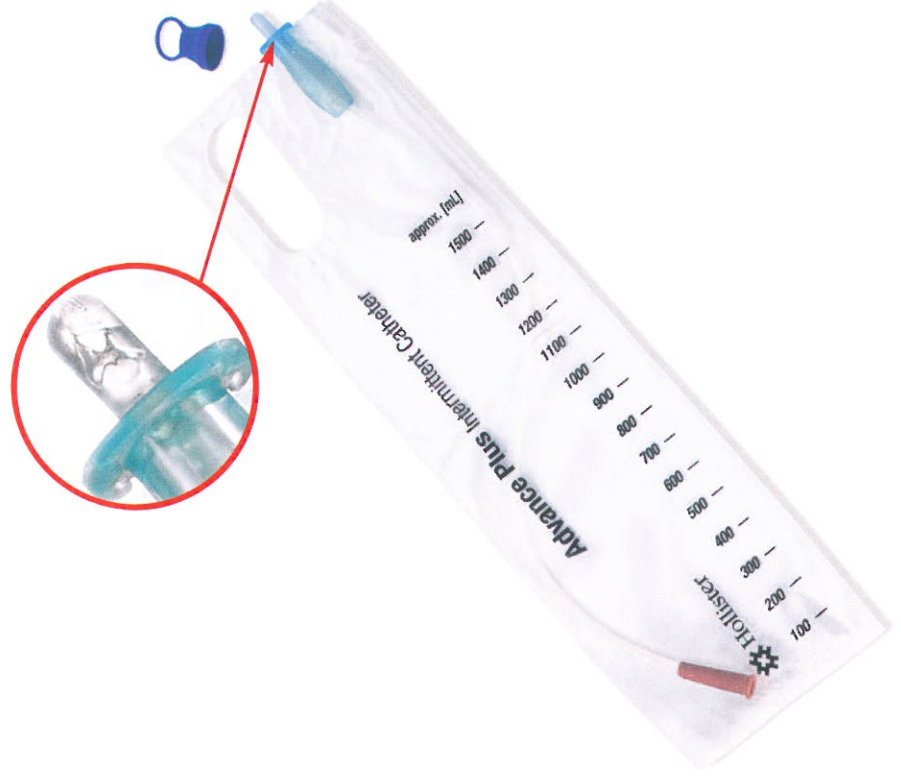

Användarmanual för män



Hollister
Erhagsslingen 5
187 40 TÄBY
Tel: 08-446 46 46
Fax: 08-446 46 45
kundtjanst@hollister.com



Denna manual är en rekommendation från tillverkaren. Var noga med att alltid följa de instruktioner du fått av din läkare/sjuksköterska.




Tvätta händerna. Håll penis med ena handen, dra tillbaka förhuden. Tvätta området kring urinrörsmyrningen med mild tvål och vatten vid dagens första tappning, därefter endast med vatten. Eller följ de instruktioner Du fått av Din läkare/sjuksköterska.




Ta katetern ur yttreförpackningen.



Ta bort kateterns blå skyddshatt.

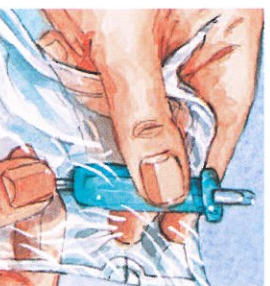

Håll löst med en hand om gelbehållaren (det är viktigt att hålla löst så att inte onödigt mycket gel kläms ut) och för med den andra handen ut katetern så att den fyller ut och stabiliserar den skyddande införingshysan. Katetern ska inte sticka ut utanför införingshysan.

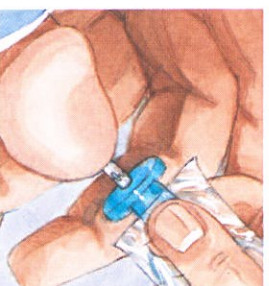

Håll penis så som Du blivit instruerad av Din läkare/sjuksköterska, och fatta katetern om gelbehållaren. Håll försiktigt långt bak på behållaren så att inte onödigt mycket gel pressas ut. För in införingshysan tills behållaren kommer i kontakt med urinrörsmyrningen.



Håll införingshysan på plats och fortsätt att föra in katetern i urinröret tills urin börjar rinna. Kläm lite extra på gelbehållaren för mer gel. Dra tillbaka uppsamlingspåsen allt eftersom katetern förs in. När urin har börjat rinna förs katetern in ytterligare några centimeter så urinblåsan töms ordentligt.



Dra sakta ut katetern så att all eventuell kvarstående urin kan rinna ut. Det går lite smidigare om penis lyfts något samtidigt som katetern dras ut.



Gör en öppning i uppsamlingspåsen genom att riva upp en bit i jacket intill införingshysan. Töm sedan urinen i en toalett eller ett uppsamlingskål.



Släng katetern i avfallsbehållare. Spola inte ned den i toaletten.