

Användarguide Infyna ChicTM hydrofil kateter



1. Se till att du har tagit fram allt du behöver för att tömma urinblåsan.

2. Tvätta dina händer noggrant.

3. Välj en bekväm ställning för kateterisering. Ta ev. av kläder för att enklare komma åt underlivet.



4. Sära på blygdläpparna med en hand. Vid behov rengör underlivet.

5. Öppna behållaren genom att trycka upp locket med din hand så att förseglingen bryts*.



6. Greppa konan och dra ut katetern. Var noggrann med att inte röra andra delar av katetern. Lägg ifrån dig behållaren.



7. Sära på blygdläpparna med två fingrar på din lediga hand. För in katetern i urinröret tills urinen börjar rinna.



8. När urinen slutat rinna drar du långsamt ut katetern. Om urin börja rinna igen, pausar du tills urinflödet helt slutat. När du är säker på att blåsan är tom, dra långsamt ut katetern.



9. Placera katetern tillbaka i behållaren, stäng locket och kassera som lämpligt, direkt eller när tillfälle ges. FÅR EJ SPOLAS NED I TOALET.



10. Avsluta med att tvätta dina händer.



Infyna ChicTM
Intermittent Catheter

Infyna ChicTM hydrofil kateter egenskaper

Klar att använda

steril kateter som kan användas direkt

Uppfällbart lock

kan öppnas och stängs med en hand

Säker återförslutning

läcker ej vid återförslutning i behållaren



Med hänsyn till dig och miljön

PVC fri med återvinningsbar behållare



Greppvänlig

Konan på kateters topp är greppvänlig och kan användas även vid nedsatt handfunktion



För mer information scanna QR-koden eller besök www.hollister.se/sv-se/infynachic

Det går även bra att kontakta vår kundservice

info.se@hollister.com

08 446 46 46

***Varning:** Använd inte om förpackningen är skadad eller öppnad. För att minska risken för infektioner och andra komplikationer får du inte återanvända produkten. Om obehag eller något tecken på skada förekommer ska du sluta använda produkten och rådfråga din läkare.

Försiktighetsåtgärder: Rådfråga din läkare innan du använder produkten om något av följande tillstånd förekommer: Skadad uretra, oförklarad blödning i uretra, tydlig förträngning, falsk passage, uretrit – urinrörsinflammation.

Självkaterisering ska följa vårdplanen och rådgivningen från din läkare och enbart utföras enligt de tillhandahållna bruksanvisningarna. Eftersom kateriseringsfrekvensen varierar per person bör den rekommenderade frekvensen för din katerisering tillhandahållas av din läkare. Om du har andra frågor om kateriseringen ska du kontakta din läkare.

Viktigt! Förvara förpackningarna i lugn och vid normal rumstemperatur. Om du behöver hjälp med produkterna kontaktar du sjukvården. Kontakta din lokala distributör eller tillverkaren, samt lokal behörig myndighet, om en allvarig personskada (incident) skulle inträffa i samband med användningen av produkten. För mer information, se www.hollister.com/authority eller kontakta EC-representanten eller den lokala distributören.

CE Före användning, var noga med att läsa användarinstruktionerna för information om avsedda användning, kontraindikationer, försiktighetsåtgärder och instruktioner. Hollister, Hollister logotyp och Infyna Chic är varumärke som tillhör Hollister Incorporated.
© 2022 Hollister Incorporated. SE-001136